

NOTICE DE MONTAGE

Visière de protection individuelle

1



ÉTAPE 1 : Retirez le film protecteur des deux côtés de la feuille transparente.

2



ÉTAPE 2 : Tenez la feuille à un angle de 90 degrés et fixez-la sur le côté gauche de la visière.

3



ÉTAPE 3 : Rabattez la feuille.

4




ÉTAPE 4 : Fixez l'autre côté de la feuille à la visière. Pour ajuster l'angle de la feuille, utilisez le trou supérieur, central ou inférieur sur les côtés gauche et droit.

5



ÉTAPE 5 : Montez le centre de la feuille au centre de la visière.

6

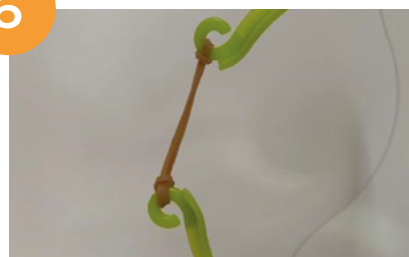

ÉTAPE 6 : Fixez l'élastique à l'arrière.

7



ÉTAPE 7 : La visière est prête à l'emploi.

Données techniques

Visière	PP Nature + Green MB (matériau de qualité alimentaire)
Feuille transparente	PET
Entretien	Eau savonneuse et chiffon microfibre
Dimensions (H x L x P)	25 x 16,4 x 23 cm
Poids	75 grammes
Fabrication	Danemark
Certification	CE

Contactez-nous pour plus d'informations :

+41 (0) 21 556 76 77 • contact@azergo.ch • www.azergo.ch
Rue Caroline 2 • 1003 LAUSANNE • Suisse